

# BEYOND

GUÍA DE CONEXIÓN  
CON EL CELULAR



# BEYOND

---



## GUÍA DE CONEXIÓN CON EL CELULAR

### 1-Preparación

- Encender el BLUETOOTH del teléfono
- Colocar pila nueva en los audífonos

### 2-Configuración

- Abrir los AJUSTES del teléfono
- Seleccionar GENERAL
- Seleccionar ACCESIBILIDAD
- Seleccionar AUDÍFONOS

### 3-Emparejamiento de los audífonos

- Abrir y cerrar el portapila de los audífonos
- Abrir BLUETOOTH en el teléfono
- Pulsar el nombre de los audífonos cuando se visualicen en DISPOSITIVOS
- Pulsar enlazar cuando aparezca la solicitud de enlace para cada audífono

### 4-Proceso completado

- Confirmar el emparejamiento cuando aparezca un tilde de selección junto al nombre de los audífonos.
- Ya se puede utilizar BEYOND con el teléfono.