

WIDEX ALLURE™ BTE R D RECARGABLE




WIDEX BTE R D forma parte de la familia WIDEX ALLURE™. Diseñado entorno a la plataforma WIDEX ALLURE™, además de ofrecer un sonido muy nítido en situaciones de escucha complejas, brinda una percepción inigualable del entorno.

Adaptar un BTE R D es más fácil que nunca gracias al nuevo software de adaptación «Widex Compass Cloud». Una solución basada en la nube, capaz de brindar un software de adaptación cómodo y racionalizado, siempre actualizado.

BTE R D funciona con una batería integrada de iones de litio.

- Conectividad inalámbrica móvil directa (2,4 GHz)
- Compatible con TV PLAY 2 y RC-DEX
- 4 niveles de rendimiento: 440/330/220/110
- Control de preferencias, selector de programa y bobina inductiva estándar
- Es alimentado por una batería recargable de iones de litio
- Botón de control de preferencias con LED integrado
- Grado de protección IP68
- Pérdidas de la audición de mínimas a severas y profundas

RANGO DE ADAPTACIÓN RECOMENDADO

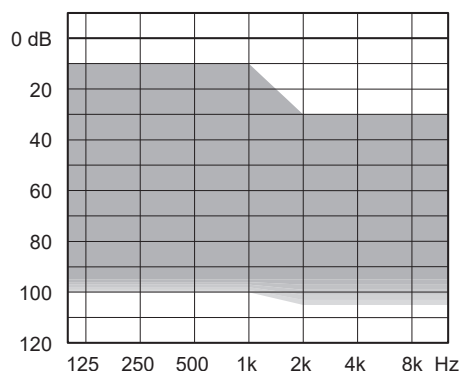

TECNOLOGÍA ESTÁNDAR

- Plataforma Allure con tecnología ZeroDelay™
- Controlador de feedback dinámico
- Widex Fitting Rationale 2.0 para una primera adaptación mejorada
- TruAcoustics™ para una adaptación y un sonido personalizados
- Enfanzador del habla Pro para una mejor comprensión del habla en entornos con ruido

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	440	330	220	110
Rendimiento	*****	*****	****	..
Canales de procesamiento y readaptación	15	12	10	8
Controlador de feedback dinámico	•	•	•	•
Allure PureSound™	•	•	•	•
TruAcoustics™ 2.0	•	•	•	•
Enfanzador del habla Pro	****	***	**	•
Algoritmo de adaptación Widex 2.0	•	•	•	•

CONECTIVIDAD

Compatibilidad con iOS, ASHA y LE Audio	•	•	•	•
Conexión Bluetooth 2,4 GHz	•	•	•	•
Comunicación manos libres (iOS)	•	•	•	•
Bobina inductiva	•	•	•	•

APLICACIONES PARA iOS Y ANDROID

Aplicación Allure	•	•	•	•
-------------------	---	---	---	---


CARACTERÍSTICAS

Clasificador de sonido - Clases	11	8	6	4
Programas	5	4	3	3
Localizador HD Bandas	15	12	10	8
Pabellón digital	•	•		
Suavizador TruSound	***	***	•	•
Smartwind Manager™	***	***	•	•
Reducción del ruido suave	***	***	***	•
Control de preferencias con LED	•	•	•	•
Botón pulsador programable	•	•	•	•
Control de llamadas**	•	•	•	•


** Programable: como botón de programa, como botón de ajuste de sonido **Para dispositivos iOS compatibles.

Para obtener información sobre la compatibilidad con dispositivos WIDEX ALLURE de transmisión directa, visite: global.widex.com/compatibility


SALIDA MÁXIMA, SIMULADOR DE OÍDO

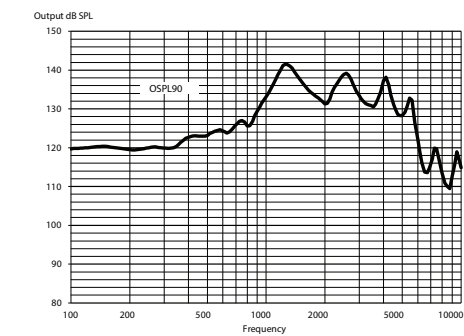


SALIDA MÁX., ACOPLADOR 2CC

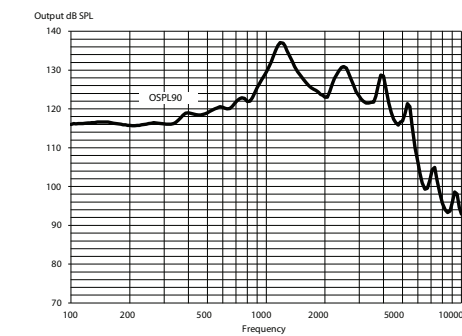

SALIDA, SIMULADOR DE OÍDO

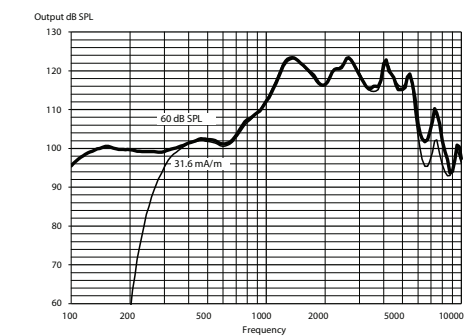

SALIDA, ACOPLADOR 2CC

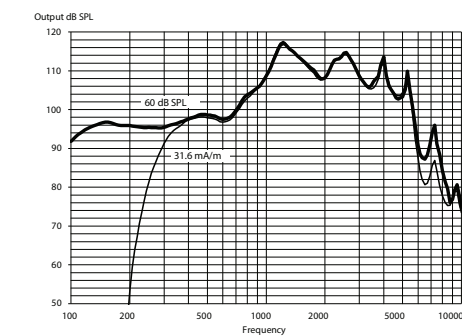

Datos técnicos: Datos típicos obtenidos durante un procedimiento de medición estándar con tonos puros. Audífono configurado en modo de Ganancia de prueba de referencia, salvo que se dé otra indicación. Datos medidos con un acoplador ITE estándar. Si desea más información, póngase en contacto con Widex en Widex.com.

		SIMULADOR DE OÍDO IEC 60118-0:1983 + A1:1994	ACOPLADOR 2CC EN IEC 60118-0:2024 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Máxima HFA	135 dB SPL 141 dB SPL -	- 137 dB SPL 129 dB SPL
Salida acústica (Entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz Máxima HFA	121 dB SPL 124 dB SPL -	- 118 dB SPL 112 dB SPL
Ganancia de prueba de referencia	RTF/HFA	61 dB	52 dB
Ganancia máxima (Entrada de 50 dB SPL)	1600 Hz Máxima HFA	72 dB 76 dB -	- 67 dB 65 dB
Salida de la bobina inductiva (Entrada de 31,6 mA/m)	1600 Hz Máxima HFA	122 dB SPL 124 dB SPL -	- 119 dB SPL 113 dB SPL
Rango de frecuencia acústica		110 Hz - 8300 Hz	100 Hz - 5800 Hz
Distorsión armónica (típica)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	<3 % <3 % <2 % -	<3 % <3 % <2 % <2 %
Latencia		<15 ms	<15 ms
Ruido de entrada equivalente		18 dB SPL	19 dB SPL
Duración de la batería* (recargable)		hasta 24 h	
Inmunidad a teléfonos móviles (IEC 60118-13:2019, ANSI C63.19:2019)		IEC M: Uso compatible / T: Uso compatible ANSI M: cumple / T: cumple	

* La duración de la batería se basa en una configuración de ajuste inicial usando el 60 % del rango de adaptación y una señal de entrada ISTS (señal de prueba de voz internacional) de 65 dB SPL, **con cinco horas diarias de transmisión más 1 hora de modo auricular**. La duración real de la batería, que se basa en 1500 ciclos de carga completos de la batería (4 años aproximadamente), depende, entre otros factores, de las funciones que estén activadas, de la pérdida de la audición, el tiempo de transmisión y el entorno sonoro.

No modifique este dispositivo sin la autorización del fabricante. Puede obtener piezas de repuesto e instrucciones de reparación de Widex.