



APLICACIÓN WIDEX **ALLURE™**
GUÍA RÁPIDA

PARA TODOS LOS AUDÍFONOS
WIDEX ALLURE BLUETOOTH

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



LA NUEVA APLICACIÓN WIDEX ALLURE

LA DIFERENCIA ES CLARA


Con una introducción intuitiva, tutoriales completos y un excelente soporte de las funciones de accesibilidad nativas de los teléfonos inteligentes, la aplicación Widex Allure ofrece una experiencia fluida e inclusiva.

Fue diseñado para eliminar la frustración de la tecnología y hacer que la conexión sea sencilla, permitiéndole disfrutar de un control sin esfuerzo y mantenerse completamente conectado con el mundo que le rodea.

descargue la app ahora



EMPAREJAMIENTO DE WIDEX ALLURE CON SU CELULAR

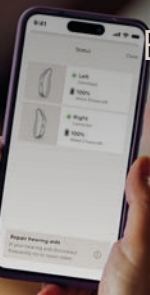


APPLE iOS

1. Ir a Ajustes y active el Bluetooth*.
2. Ir a Ajustes › Accesibilidad › Dispositivos Auditivos.
3. Apague y encienda nuevamente sus audífonos.
4. Seleccione sus audífonos entre los dispositivos auditivos MFi y presione Emparejar para cada audífono.
5. Sus audífonos ahora están emparejados con su teléfono y están listos para transmitir música y llamadas.
6. Abra la aplicación para conectar sus audífonos

ANDROID

1. Ir a Ajustes › Conexiones › Bluetooth.
2. Apague y encienda nuevamente sus audífonos. Esto los pone en modo de emparejamiento.
3. Encuentre y empareje cada audífono entre los dispositivos disponibles.
4. Cuando aparezca una ventana emergente de solicitud de emparejamiento de Bluetooth, seleccione Emparejar.
5. Sus audífonos ahora están emparejados con su teléfono y están listos para transmitir música y llamadas.
6. Abra la aplicación para conectar sus audífonos.

APP WIDEX ALLURE PANTALLA DE INICIO

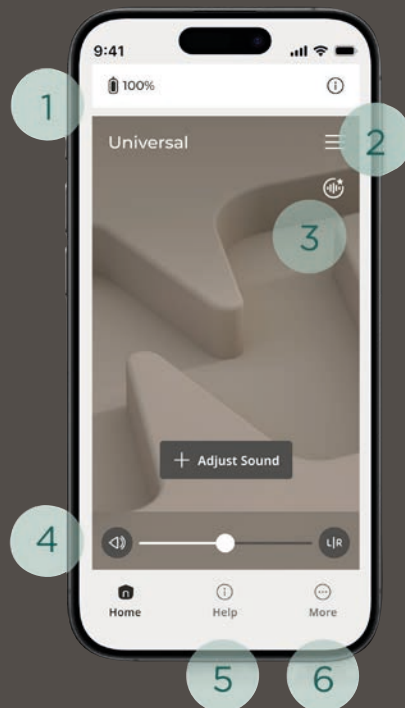

1. **Estado de la batería:** Verifique el estado de la batería y la conexión a través de un teléfono o Apple Watch.
2. **Cambio de programa:** cambia fácilmente entre programas dependiendo del entorno.
3. **Asistencia de IA:** utilice la asistencia de IA para optimizar la configuración de sonido o ajustar la experiencia auditiva en entornos desafiantes.
4. **Nivel de volumen ambiente:** ajuste el nivel de volumen, silencie el micrófono o cambie el volumen derecho/izquierdo para una experiencia auditiva personalizada.
5. **Ayuda y solución de problemas:** instrucciones de instalación y emparejamiento fáciles de seguir, con videos tutoriales.


TRANSMITA DIRECTAMENTE A SUS AUDÍFONOS

Escuche llamadas, música y todo lo que necesite desde su celular directamente a sus audífonos Allure. Ajuste el balance entre la transmisión y el entorno desde la app.

Guía práctica:

Controle el volumen de transmisión de audio desde el celular y el volumen ambiente directamente desde la aplicación.

1. Inicie una transmisión de audio usando su aplicación de audio favorita en su celular.
2. Vaya a la pantalla de inicio de la aplicación Allure y vea los dos controles deslizantes de volumen.
3. Ajuste el control deslizante del volumen del teléfono para controlar el nivel del audio que proviene del celular.
4. Ajuste el control deslizante de volumen del ambiente para controlar el nivel del sonido que entra a través del micrófono de los audífonos.
5. Seleccione el botón Ajustar sonido para configurar el ecualizador y perfeccionar el perfil de sonido al transmitir audio. El perfil se guardará para las próximas veces.

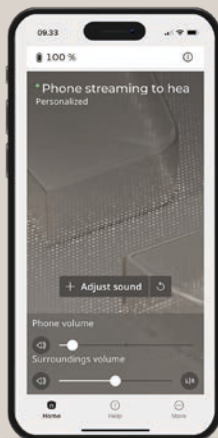


PERSONALICE EL SONIDO

Ajuste sus audífonos para que suenen exactamente como usted desea. Puede realizar los ajustes temporalmente o guardarlos permanentemente en un programa personal que desee conservar en la aplicación Allure.

Guía práctica:

En la pantalla de inicio, hay un botón central llamado “Ajustar sonido”. Al pulsarlo, se muestran las siguientes funciones:

1. La función **Enfoque direccional*** le permite elegir una dirección en la que enfocar sus audífonos. (*solo disponible en el programa Universal)
2. La función **Asistente Rápido de IA** le permite modificar rápidamente la configuración de sonido actual para adaptarla a su actividad.
3. La función **Ecualizador** le permite ajustar el nivel de frecuencias específicas.

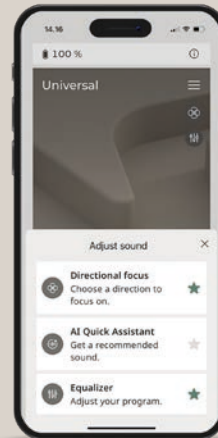

ASISTENTE DE SONIDO CON IA


Con la ayuda del Asistente de Sonido con IA, puede crear programas personalizados que son fáciles de cambiar. Con instrucciones simples, una experiencia auditiva más personalizada está a solo unos clics de distancia.

Guía práctica:

Ajuste la configuración de sonido para situaciones específicas y guárdelas como programas personalizados para uso futuro.

Vaya a la descripción general del programa y seleccione Asistente de Sonido AI en la parte inferior para encontrar un perfil de sonido a su gusto.

1. Seleccione una situación adecuada para la cual necesita el programa, por ejemplo, “Comedor”.
2. Seleccione que quiere optimizar por ej. “Conversación”.
3. Escuche los dos perfiles de sonido sugeridos y califíquelos. El mejor valorado será guardado como el nuevo preferido. Continúe hasta que esté satisfecho y guarde el programa.

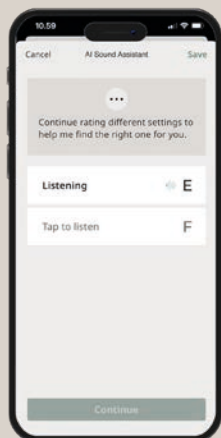


AYUDA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mire tutoriales en video, obtenga instrucciones, encuentre soluciones a problemas y obtenga ayuda para encontrar sus audífonos si los pierde.

Guía práctica:

En la parte inferior de la aplicación, puede encontrar los botones “Ayuda” y “Acerca del tema”.

1. En la sección “Ayuda”, puede acceder a guías sobre “Mi Guía”, “Conexión y Solución de Problemas” y “Problemas de Sonido”.
2. En cada tema, encontrará una gran cantidad de información sobre audición, resolución de problemas de audífonos y solución de problemas de sonido.
3. En la sección “Acerca del tema”, puede encontrar herramientas para configurar sus audífonos y la aplicación.
4. También puede encontrar la función “Buscar mi audífono”. Esta le permite ver dónde se conectaron sus audífonos a la aplicación por última vez y buscarlos por Bluetooth.

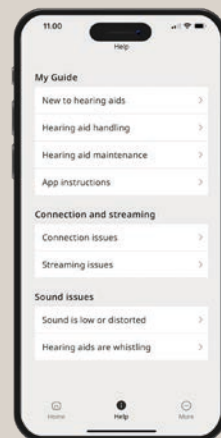

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con el emparejamiento:

- Compruebe que el Bluetooth esté activado y que los audífonos estén cerca de su teléfono.
- Cargue las baterías del audífono.
- Apague y vuelva a encender sus audífonos. Los audífonos permanecen en modo de emparejamiento durante los tres primeros minutos después de encenderlos.
- Desactive y active nuevamente el Bluetooth en su teléfono y deje que los audífonos se conecten al teléfono.
- Asegúrese de que la aplicación Widex Allure tenga acceso a Bluetooth. Vaya a Ajustes > Aplicaciones > Aplicación ALLURE y active el Bluetooth.

Si aún no funciona:

- Desempareje y vuelva a emparejar.
- Cierre la aplicación Widex Allure si está activa.
- Reinicie su celular.
- Reinicie sus audífonos y comience nuevamente con el proceso de emparejamiento.

Si tiene problemas de transmisión con iOS:

- En su celular, vaya a Configuración > Accesibilidad > Dispositivos auditivos y verifique que los audífonos estén emparejados con el teléfono.
- Vaya a Ajustes > Accesibilidad > Dispositivos auditivos > Enrutamiento de audio. Asegúrese de que "Audio de llamadas" y "Audio multimedia" estén configurados en "Automático" o "Siempre" en dispositivos auditivos.
- Desactive y active nuevamente el Bluetooth en su celular y deje que los audífonos se conecten al teléfono.
- Asegúrese de que su teléfono tenga una conexión de red móvil o Wi-Fi de buena calidad.

Obtenga más información en

<https://www.widex.com.ar/audifonos/apps/moment-app>

¿Su celular es compatible?

<https://www.widex.com.ar/soporte-y-cuidado/compatibilidad>

¿Quiere consejos o más información sobre audición y pérdida auditiva?

<https://www.widex.com.ar/perdidas-auditivas>



SOUND LIKE NO OTHER

Widex es una marca registrada de WIDEX A/S

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de WSAUD A/S se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

MÁS INFORMACIÓN EN WIDEX.COM.AR